



Informační leták pro uživatele

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto informaci. Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. NasaDrops® je zdravotnický prostředek.

NeilMed® NasaDrops® roztok na cesty

Výrobce: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balení:

- 15 jednorázových ampulí po 15 ml
- brožura a návod k použití (v anglickém jazyce), příbalová informace s pokyny a upozorněními

NasaDrops® roztok na cesty je sterilní nosní solný roztok bez léčiv a konzervačních látek, který zklidňuje a zvlhčuje suchý nebo ucpaný nos u kojců.

Ampulky o objemu 15 ml jsou vhodné pro použití doma, ve školce, ve škole, na hřišti, na cestách i v nemocnici. Několik kapek roztoku chloridu sodného zvlhčí nos a nosní dutiny, zatímco stisknutí většího množství zajistí jemný výplach nosu. Tento výrobek je vhodný pro děti od 6 měsíců (u dětí mladších 6 měsíců se poraďte s lékařem).

NasaDrops® roztok na cesty se používá především k:

- řešení alergické rýmy a suchého nosu
- překrvení nosní sliznice
- nosní příznaky při chřipce a nachlazení
- podráždění nosu způsobené prachem z práce a domácnosti, kouřem, zvířecí srstí, travami, pyly, znečištěným životním prostředím

Návod k použití:

NeilMed® NasaDrops® cestovní roztok je sterilní nosní solný roztok bez léčiv, konzervačních látek, který zklidňuje a hydratuje. Je určen pro kojence, děti a dospělé, kteří trpí suchým nebo ucpaným nosem.

Použití pro nos a nosní dutiny:

Krok 1: Ampulku nebo nádobku otevřete pootočením.

Krok 2: Pokud používáte pro dítě, držte dítě nebo kojence ve vzpřímené poloze.

Krok 3: Nakloňte hlavu dítěte nebo dítě mírně dopředu.

Krok 4: Vložte špičku lahvičky do nosní dírkou.

Krok 5: Jemným stisknutím lahvičky dávkujte několik kapek k hydrataci, v případě potřeby stiskněte silněji, abyste dodali více roztoku k propláchnutí dutin a nosu. V závislosti na velikosti nosní dutiny bude propláchnutý fyziologický roztok s hlenem vycházet druhou nosní dírkou. Nepoužitý roztok zlikvidujte.

Krok 6: Používejte až šestkrát denně podle potřeby nebo podle pokynů lékaře.

Krok 7: Jakmile je lahvička nebo nádobka prázdná, můžete ji použít jako jednorázovou odsávačku k odsávání nosního sekretu.

UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek má používat dospělá osoba, která rozumí použití u kojenců a dětí. Je třeba dodržovat všechny pokyny.

- Nepoužívejte do nosu, když dítě leží na zádech, abyste zabránili kašli, dušení nebo stékání hlenu či fyziologického roztoku do krku
- nemíchejte s jinými tekutinami nebo přísadami
- určeno k zevnímu použití, nikoliv k injekčnímu podání
- nepoužívejte, pokud je roztok zakalený nebo pokud ampule vytékají nebo jsou rozbité
- zlikvidujte otevřený a nepoužitý roztok
- uchovávejte mimo dosah dětí
- barva a tvar ampulí se mohou lišit
- uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla
- uchovávejte na chladném a suchém místě



CISTYnos.cz

Distributor:

PAVLOVIC, s. r. o., Oreburská 1, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.cistynos.cz info@cistynos.cz, mobil: +421 907 368 190

Revize: 05/2025