

STERILE	A
---------	---


0123

Príbalová informácia pre užívateľa

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnik. NasaDrops® je zdravotnícka pomôcka.

NeilMed® NasaDrops® roztok na cesty / saline on the go

Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balenia:

- 15 ampuliek na jedno použitie po 15 ml
- brožúra a návod na použitie (anglický jazyk), príbalová informácia s návodom a varovaniami

NasaDrops® roztok na cesty je sterilný nosový soľný roztok bez liečiv a konzervačných látok, ktorý upokojuje a hydratuje suché alebo prepchaté nosy dojčiat.

15 ml ampulky sú vhodné pre domácnosti, škôlky, školy, detské ihriská, cestovanie a nemocničné použitie. Niekoľko kvapiek roztoku chloridu sodného hydratuje váš nos a dutiny, pričom stlačenie väčšieho množstva dodá jemný preplach nosovej dutiny. Tento produkt je vhodný pre deti od 6 mesiacov a viac (pri deťoch mladších ako 6 mesiacov sa poraďte s lekárom).

NasaDrops® roztok na cesty sa používa hlavne pri:

- pri alergickej nádche a suchu v nose
- prekrvenie nosovej sliznice
- nosové príznaky z chrípky a prechladnutia
- podráždenie nosa z pracovného a domáceho prachu, dymu, zvieracej srsti, tráv, peľov, environmentálneho znečistenia

Návod

NeilMed® NasaDrops® roztok na cesty je bez liečiv, bez konzervačných látok, sterilný nosný soľný roztok, ktorý upokojuje a hydratuje. Určený je pre dojčatá, deti aj dospelých, ktorí trpia suchým alebo upchatým nosom.

Použitie pre nos a dutiny:

Krok 1: Otočením otvorte ampulku alebo nádobku.

Krok 2: Ak používate pre dieťa, držte bábätko alebo dieťa vo vzpriamenej polohe.

Krok 3: Nakloňte dieťa alebo hlavu dieťaťa mierne dopredu.

Krok 4: Vložte špičku ampulky do nosovej dierky.

Krok 5: Stlačením nádobky jemne dávkujte pár kvapiek na hydratáciu, stlačte viac v prípade potreby dodať väčšie množstvo roztoku na preplach dutín a nosa. V závislosti na veľkosti nosnej dutiny, bude preplachovaný fyziologický roztok s hlienom vytekať z druhej nosovej dierky. Nepoužitý roztok znehodnoťte.


Krok 6: Použite až šesťkrát denne podľa potreby alebo podľa pokynov svojho lekára.

Krok 7: Akonáhle je ampulka alebo nádobka prázdna, môžete ju použiť ako jednorazovú odsávačku na odsávanie nosného sekrétu.

VAROVANIE

Tento výrobok má byť použitý dospelou osobou, ktorá pochopila použitie u dojčiat a detí. Musia sa dodržiavať všetky pokyny.

- nepoužívajte v nose, zatiaľ čo je dieťa v ľahu na chrbte, aby sa zabránilo kašľu, duseniu alebo stekaniu hlienu alebo fyziologického roztoku do krku
- nemiešajte s inými tekutinami alebo prísadami
- určené na vonkajšie použitie, nie na injekčné použitie
- nepoužívajte, ak je roztok zakalený alebo ampulky netesnia alebo sú nalomené
- zlikvidujte otvorený a nepoužitý roztok
- uchovávajte mimo dosahu detí
- farba a tvar ampuliek sa môžu líšiť
- udržiajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia
- skladujte v chlade a suchu

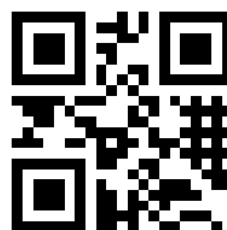

Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oreburská 1, 974 04 Banská Bystrica
www.cistynos.sk info@cistynos.sk, mobil: 0907 368 190

Revízia: 04/2017