



Informační leták pro uživatele

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto informaci. Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. NasaMist® je zdravotnický prostředek.

NeilMed® NasaMist® sterilní izotonický / hypertonický (extra silný) solný sprej

Výrobce: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balení:

- 1 kus sterilní izotonické plechovky - 75 ml / 1 kus hypertonické plechovky - 125 ml
- návod k použití (v anglickém jazyce), příbalový leták s pokyny a upozorněními

NasaMist® - sterilní fyziologický sprej k ochraně, čištění, hydrataci a zklidnění nosních cest.

Aplikace jemné mlhy do nosu je vynikajícím způsobem, jak udržet nosní dírkou vlhké. NasaMist® fyziologický sprej se dodává v izotonickém nebo hypertonickém složení. Nosní spreje by neměly být zaměňovány s velkoobjemovými výplachovými systémy, jako je například nosní sprcha Sinus Rinse™.

Použití pro:

- alergickou rýmu a suchý nos
- zánět vedlejších nosních dutin, rýmě
- alergické astma
- kapání z nosu
- tlak v nosních dutinách a otok nosní sliznice
- nosní příznaky při chřipce a nachlazení
- podráždění nosu prachem z práce a domácnosti, kouřem, zvířecími chlupy, travami, pyly, znečištěným životním prostředím

Návod pro NasaMist®- izotonický/hypertonický solný sprej

Solný sprej bez obsahu léčiv, který pomáhá zmírnit příznaky alergické rýmy, suchého, kapajícího nosu, z nachlazení nebo chřipky. **Hypertonický roztok** dodává více než dvojnásobnou koncentraci solného roztoku ve srovnání s izotonickým. **Před použitím u dětí mladších 6 měsíců se poraďte s lékařem.**

Krok 1: Vložte špičku nástavce do nosní dírkou a jemným stisknutím nastříkejte **přiměřený** objem, abyste udrželi nosní dírkou vlhké.

Krok 2: Opakujte u druhé nosní dírkou. U kojenců a dětí nezasouvejte nástavec do nosní dírkou více, než je příruba. Používejte tak často, jak je potřeba, abyste udrželi nos hydratovaný.

Výhody hypertonického - extra silného roztoku ve spreji

Výzkumy ukazují, že hypertonický (2,7 %) nebo koncentrovanější roztok může pomoci snížit ucpaní nosu lépe než izotonický (0,9 %) roztok. Je to proto, že koncentrovanější fyziologický roztok vytáhne z ucpané tkáně více vody, sníží otok a otevře nosní dírkou a otvory dutin, což umožní lepší proplachování.* Je možné, že při použití hypertonického roztoku se může objevit dočasné pálení nebo štípání. Pokud tento problém přetrvává, použijte izotonický sprej.

UPOZORNENÍ

- systém je určen pro jednoho uživatele, aby se snížilo riziko kontaminace
- nosní dírky nesmí být během používání zcela ucpané, aby nedocházelo k tlaku v nose nebo v uších
- uchovávejte mimo dosah dětí
- obsah je pod tlakem, nepropichujte jej a nevhazujte do ohně
- skladujte při teplotě od 5 °C do 55 °C, mimo dosah slunečního záření a zdrojů tepla, sprej nesmí zmrznout
- před použitím u dětí mladších šesti měsíců se poradte s lékařem

Nosní spreje nelze považovat za plnohodnotný výplach a omývání nosních a vedlejších nosních dutin. K tomuto účelu se používají velkoobjemové výplachové systémy - nosní sprchy Sinus Rinse™.

* Ve srovnání s izotonickým roztokem.



CISTYnos.cz

Distributor:

PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.cistynos.cz, info@cistynos.cz, mobil: +421 907 368 190

Revize: 05/2025