



Informační leták pro uživatele

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto informace. V případě jakýchkoli dalších otázek se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. NeilMed® NasoGel® je zdravotnický prostředek.

NeilMed® NasoGel® nekapající gelový sprej

Výrobce: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balení:

- 30 ml sprej se stlačitelnou pumpičkou
- příbalový leták s pokyny a upozorněními

NasoGel® Spray je fyziologický nosní sprej bez obsahu léčiv, jehož základem je ve vodě rozpustný gel se solemi kyseliny hyaluronové, který zajišťuje zvlhčení nosu.

NasoGel® dodává tekutiny pro doplnění vlhkosti a zlepšuje stav suchých a podrážděných nosních cest způsobených suchým klimatem a teplým interiérem. Pomáhá snižovat suchost nosu během letů, při léčbě kyslíkem a také při příznacích suchosti způsobené atrofickou rýmou, radioterapií nebo po operaci dutin.

Pokyny:

Jednou za 4 až 6 hodin naneste malé množství NasoGelu® do každé nosní dírky pomocí spreje, čistého vatového tamponu nebo prstu v gumové rukavici. V případě přetrvávajícího sucha v nose můžete frekvenci zvýšit.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem. Používejte pouze podle pokynů. Nepoužívejte, pokud jsou ústa suchá.

NasoGel® nekapající gelový sprej pomáhá zmírnit suchost v nose způsobenou:

- suchým vzduchem
- oxygenoterapií
- sinusitidou
- alergií
- nachlazením

Výhody, které Nasogel® nabízí:

- fyziologický sprej na bázi ve vodě rozpustného gelu s kyselinou hyaluronovou a solemi aloe vera
- nekapající provedení spreje
- vynikající zvlhčující sprej na suché nosní dírky

Návod k použití:

Pokyny:

Použijte 1-2 vstřiky přípravku NasoGEL® do každé nosní dírky každých 4 až 6 hodin. V případě přetrvávající suchosti v nose můžete frekvenci používání zvýšit.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. **Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou ze složek uvedených na obalu.**



Krok 1: Odstraňte uzávěr z trysky.



Krok 2: Odstraňte modrý kryt a modrou bezpečnostní pásku.



Krok 3: Naplnění tlakového mechanismu:

(A) Stiskněte trysku a podržte ji v dolní poloze po dobu 4 sekund podle obrázku.

(B) Uvolněte trysku.

(C) Kroky (a) a (b) opakujte 4-5krát nebo dokud gel nevyjde ven.

DŮLEŽITÉ: Pro dosažení maximálního výstupu postřiku je nutné stisknout tlačítko a poté držet trysku po celé 4 sekundy, jak je znázorněno na obrázku 3.



Krok 4: Po naplnění tlaku NasoGel® je gel připraven k okamžitému použití.



Krok 5: Pomocí 2-4 stříků mechanismu dejte do každé nosní dírky gel každých 4-6 hodin. V případě přetrvávajícího sucha v nose, můžete frekvenci zvýšit.



Krok 6: Po použití nasadte bezpečnostní pásku a uzávěr, abyste zabránili vysychání. Tryska zůstane pod tlakem několik dní. Poté ji bude třeba znovu natlačit, protože dojde ke ztrátě tlaku vzduchu.



Distributor:

PAVLOVIC, s. r. o., Oreburská 1, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
info@cistynos.cz, www.cistynos.cz, mobil: +421 907 368 190