

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto informace. V případě jakýchkoli dalších otázek se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. NasoGel® je zdravotnický prostředek.

NeilMed® NasoGel® tuba s gelovým roztokem

Výrobce: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balení:

- 1 tuba - 28,4 g
- příbalový leták s pokyny a upozorněními

NasoGel® Tube je ve vodě rozpustný nosní gel na bázi fyziologického roztoku bez léčiv, který obsahuje soli kyseliny hyaluronové a zajišťuje zvlhčení nosu.

NasoGel® poskytuje tekutiny pro doplnění vlhkosti, které zlepšují stav suché a podrážděné nosní sliznice způsobené suchým klimatem nebo vytápěnými prostory. Pomáhá snižovat suchost nosu během letů, po kyslíkové terapii a také příznaky suchosti způsobené atrofickou rýmou, radioterapií nebo po operaci dutin.

Zvlhčující gel NasoGel® pomáhá zmírnit suchost nosu způsobenou:

- suchým vzduchem
- oxygenoterapií
- sinusitidou
- alergiemi
- nachlazením

Návod k použití - NasoGel® gelový roztok v tubě

Používejte pouze podle pokynů, v případě přetrvávajících potíží navštivte svého lékaře nebo zdravotnického pracovníka.

Pokyny

Pomocí čistého vatového tamponu nebo prstu v gumové rukavici naneste jednou za 4 až 6 hodin malé množství přípravku NasoGel® do každé nosní dírky. Pokud suchost v nose přetrvává, můžete četnost použití zvýšit.

Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem. Používejte pouze podle pokynů. Nepoužívejte na sucho ústech.

Výhody, které nabízí NasoGel®:

- fyziologický gel na bázi ve vodě rozpustného gelu s kyselinou hyaluronovou a solemi aloe vera
- vynikající hydratační gel na suché nosní dírky
- používat každých 4-6 hodin nebo podle potřeby



Distributor:

PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
info@cistynos.cz, www.cistynos.cz, mobil: +421 907 368 190