



Informační leták pro uživatele

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto informaci. Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Naspira® je zdravotnický prostředek.

NeilMed® Naspira® nosno-ústní odsávačka

Výrobce: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balení:

- 1 Naspira® nosno-ústní odsávačka
- 6 náhradních filtrů
- brožura (v anglickém jazyce), příbalový leták s pokyny a upozorněními

Nosní-ústní odsávačka NeilMed® Naspira® je unikátně navržený systém, který kombinuje několik důležitých bezpečnostních, kvalitativních a efektivních vlastností.

Díky jedinečnému designu 2-v-1 jej lze použít jako bankovní odsávačku NeilMed® NasaBulb® nebo jako účinnou noso-ústní odsávačku, kdy rodiče mohou využít sací sílu vyvíjenou ústy podobně jako při sání brčkem. S odsávačkou NeilMed® Naspira® lze rychle a bezpečně odstranit nosní hlen. Efektivně vytváří negativní proud vzduchu o objemu 5 až 10 litrů nebo více za minutu s prodlouženým odsáváním, na rozdíl od jednoduchého odsávání s bankovní odsávačkou, kde je doba odsávání kratší než půl sekundy. Odsávačka NeilMed® Naspira® je navíc k dispozici s jednorázovými filtry, které chrání rodiče před kontaktem s hlenem. Jednosměrný ventil ve filtru zabraňuje vniknutí velkého množství vzduchu z úst rodiče a vyfouknutí do nosu dítěte, čímž se hlen nedostane níže do krku.

Naspira® se používá především díky svým vlastnostem:

- průhledný design, sterilizovatelný, bezpečný pro kojence a batolata
- obsahuje řadové jednorázové filtry, které snižují riziko kontaminace
- odnímatelné součásti pro snadné čištění
- konstrukce 2v1 umožňuje Naspiru® používat jako odsávačku nebo nosno-ústní odsávačku s hadičkou
- doživotní záruka, vyrobeno z vysoce kvalitního silikonu, lze mýt v myčce nádobí (kromě jednorázových filtrů).

Návod k použití Naspira®

Účel Naspira® - ústně-nosní odsávačky je unikátně navržená nosní odsávačka pro účinné odsávání ucpaného nosu dítěte.

Klíčové vlastnosti:

- průhledný design
- bezpečná pro kojence a batolata
- dodává se se 7-vrstvými řadovými jednorázovými filtry pro snížení rizika kontaminace
- součásti jsou odnímatelné pro snadné čištění
- konstrukce 2v1 umožňuje používat odsávačku Naspira jako bankovní odsávačku i jako odsávačku pro orální sání
- lze mýt v myčce nádobí (s výjimkou jednorázových filtrů)
- koncovka je vyrobena z vysoce kvalitního silikonu a je velmi jemná na dotek
- jednosměrný ventil zabraňuje vniknutí vzduchu do úst rodiče
- jednorázový filtr zabraňuje vniknutí tekutin nebo hlenu do úst rodiče
- průhledné provedení umožňuje snadnou kontrolu jednotlivých součástí
- průhledné provedení snižuje množství plísni a hub, které se mohou vyskytovat v neprůhledných odsávačkách

- sací koncovku, průhledný plastový konektor, baňku, hadičku a náustek lze sterilizovat tak, že je nejprve očistíte tekutým čisticím prostředkem s mýdlem a vodou a poté očistěné části odsávačky vložíte na pět minut do vroucí vody nebo použijete postup dezinfekce v mikrovlnné troubě
- koncovka je dimenzována tak, aby se nedostala do nosních dutin dítěte a nezpůsobila poranění

Poznámka: Filtr je jednorázový a lze jej použít pouze jednou. Díky tomu je bezpečný pro všechny a nepokoušejte se jej sterilizovat ani mýt. Před použitím si prosím přečtěte upozornění. Pokud odsávačku používáte poprvé, ujistěte se, že jste ji správně sestavili podle obrázku a že jsou všechny části neporušené a čisté.

Návod k použití:

1. Dítě udržujte ve vzpřímené až mírně ohnuté poloze, dobře upevněné v náručí a ujistěte se, že je dítě v pohodlí.
2. Umístěte špičku přísavky do nosní dírky dítěte a velmi jemně sajte přes náustek, jako byste pili z brčka. V případě potřeby můžete vždy použít větší sací sílu. Náustek je jednosměrný ventil a neumožní vám dýchat do nosu dítěte.
3. Před použitím Naspira® - odsávačky s ústní dutinou - může předběžné ošetření několika kapkami roztoku chloridu sodného nebo fyziologického roztoku ve spreji do každé nosní dírky pomoci uvolnit hustý hlen. Hlen bude z nosních dírek vašeho dítěte vycházet velmi snadno a bude se shromažďovat hlavně na špičce. Pokud je hlenu hodně, dostane se také do baňky.
4. Podle potřeby opakujte předchozí kroky ve stejné a/nebo druhé nosní dírce.
5. Postupujte podle návodu k čištění a dezinfekci, abyste zajistili bezpečnost sebe i dítěte.
6. Vyměňte filtr, pokud je znečištěn sekrety nebo po akutní infekci nebo každý týden během používání.

Pokyny pro čištění a sterilizaci

Jak oddělit části pro čištění:

1. Zatlačte palcem a ukazováčkem na otvor hrotu.
2. Palcem a ukazováčkem druhé ruky stlačte baňku tak, aby se rychlým zvýšením tlaku vzduchu od sebe oddělily jednotlivé části.
3. Zbylé části rozeberte tak, že jejich konce od sebe odtáhněte. Vyjměte filtr a odložte jej stranou. Filtr nelze čistit ani sterilizovat, ale **lze jej znovu použít, pokud nepříjde do styku s hlenem**. Všechny uvolněné části omyjte teplou vodou s tekutým mycím prostředkem a poté důkladně opláchněte čistou vodou. Přebytnou vodu vytřepajte.

Pro dezinfekci můžete zvolit jednu ze dvou metod:

1. **Dezinfekce varem:** vložte díly na 5 minut do vroucí vody. Před vyjmutím dílů z vody nechte vodu zcela vychladnout. Přebytnou vodu vytřepajte. Před opětovnou montáží nechte všechny součásti oschnout vložením do papírové utěrky.
2. **Dezinfekce v mikrovlnné troubě:** vyčistěte přísavku vodou a mýdlem, přebytnou vodu vytřepajte. Odsávačku vložte na 45 sekund do mikrovlnné trouby. Tím vydezinfikujete všechny součásti podle doporučení Neilmedu zveřejněných v odborných lékařských publikacích.

Nepokoušejte se sterilizovat a znovu použít filtr. Odsávačku Naspira® pro ústní hygienu nemyjte v myčce nádobí. Myčka nádobí není schopna dostatečně vyčistit vnitřek jednotlivých částí odsávačky. Vodní trysky v myčce nemohou umýt úzké části odsávačky a ani vnitřní části nebudou důkladně vyčištěny.



CISTYNOS.cz

Distributor:

PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
www.cistynos.cz info@cistynos.cz, mobil: +421 907 368 190

Revize: 05/2025