



Informační leták pro uživatele

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto informace. V případě jakýchkoli dalších dotazů se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. NasaMist® je zdravotnický prostředek.

NeilMed® PediaMist® sterilní izotonický solný sprej pro děti od 1 roku

Výrobce: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balení:

- 1 kus plechovky sterilního izotonického roztoku - 75 ml
- návod k použití (v angličtině), příbalový leták s pokyny a upozorněními

PediaMist® - sterilní fyziologický sprej na ochranu, čištění, hydrataci a zklidnění dětských nosních cest.

Aplikace jemné mlhy do nosu je vynikajícím způsobem, jak udržet nosní dírkou vlhké. PediaMist® solný sprej se dodává v izotonické verzi. Nosní spreje by neměly být zaměňovány s velkoobjemovými výplachovými systémy, jako je například nosní sprcha Sinus Rinse™.

Použití při:

- alergické rýmy a suchém nose
- sinusitide, rýmy
- alergické astmě
- kapání z nosu
- tlaku v nosních dutinách a otoku nosní sliznice
- nosních příznacích při chřipce a nachlazení
- podráždění nosu prachem z práce a domácnosti, kouřem, zvířecí srstí, travinami, pylem, znečištěným životním prostředím

Návod k použití PediaMist® - izotonického solného spreje pro děti

Solný sprej bez obsahu léčiv pomáhá zmírnit příznaky alergické rýmy, sucha, rýmy, nachlazení nebo chřipky. Dětský sprej poskytuje speciálně navržené balení pro kojence a děti a zakončení hrotu je stejné jako na standardním izotonickém balení. **Před použitím u dětí mladších 6 měsíců se poraďte s lékařem.**

Krok 1: Vložte špičku nástavce do nosní dírkou a jemným přitlačením aplikujte dostatečný objem, aby byly nosní dírkou vlhké.

Krok 2: Opakujte pro druhou nosní dírkou. U kojenců a dětí nezasouvejte trysku do nosní dírkou více, než je příruba. Používejte tak často, jak je potřeba, abyste udrželi nos hydratovaný.

UPOZORNĚNÍ

- systém je určen pro jednoho uživatele, aby se snížilo riziko kontaminace
- nosní dírkou nemohou být během používání zcela ucpané, aby nedocházelo k tlaku v nose nebo v uších
- uchovávejte mimo dosah dětí
- obsah je pod tlakem, nepropichujte ho ani nevhazujte do ohně

- Skladujte při teplotě od 5 °C do 55 °C, mimo dosah slunečního světla a zdrojů tepla, sprej nesmí zmraznout
- před použitím u dětí mladších šesti měsíců se poraďte s lékařem

Nosní spreje nelze považovat za plnohodnotný výplach a proplach nosních a vedlejších nosních dutin. K tomu slouží velkoobjemové výplachové systémy - nosní sprchy Sinus Rinse™.



Distributor:

PAVLOVIC, s. r. o., Oreburská 1, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
info@cistynos.cz , www.cistynos.cz, mobil: +421 907 368 190

Revize: 04/2025