

Príbalová informácia pre užívateľa

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnik. Sinugator® je zdravotnícka pomôcka.

NeilMed® SINUGATOR® bezdrôtová pulzačná nosná sprcha

Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balenia:

- 1 kus pulzačný nosový zvlhčovač SinuGator®
- 30 kusov pH vyvážených predpripravených sáčkov so zmesou chloridu sodného a uhličitanu sodného (vysoký stupeň čistoty, prírodné ingrediencie, fyziologický roztok, bez konzervantov a jódu)
- 3 AA batérie
- brožúra a návod na použitie (v angličtine), príbalová informácia

SINUGATOR® sa používa hlavne pri:

- alergickej a sennej nádche, suchosti v nose
- tlaku v dutinách a upchatom nose
- nosných symptómoch chrípky a prechladnutia
- podráždení nosa z pracovného alebo domáceho prachu, dymu, zvieracej srsti, tráv, peľu, atď.
- na prekrvenie nosovej sliznice

Návod - Sinugator®

Neilmed® Sinugator® používajte len podľa pokynov, pri pretrvávajúcich problémoch navštívte svojho lekára / zdravotníckeho pracovníka.

Pokyny pre montáž:

Krok 1: Otvorte priehradku na batérie posunutím prepínača smerom doľava (otvorená poloha), zdvihnite panel a umiestnite 3 kusy AA batérií, ako sú znázornené vo vnútri priestoru pre batérie. Nasadte kryt a posuňte vypínač doprava (uzamknutá poloha).

Krok 2: Posuňte bielu mäkkú trubicu na bielu pevnú rúrku na spodnej strane motorovej jednotky.

Krok 3: Pripevnite nosový vstrekovací hrot na hornej strane motorovej jednotky.

Krok 4: Stlačte modrý vypínač, aby ste sa ubezpečili či je jednotka aktívna.

Návod na použitie:

Krok 1: Prosíme poriadne si umyť ruky. Naplňte svetlomodrú nádržku 240 ml objemu vodou destilovanou, cez mikrofilter (0,2 mikróv) filtrovanou, komerčne balenú alebo najprv prevarenú a neskôr ochladenú vodu na vlažnú alebo telesnú teplotu. Prosím, nepoužívajte vodu z kohútika alebo kohútikovou vodu pre rozpustenie zmesi.

Krok 2: Otvoríme sáčok Sinus Rinse™ v rohu a vysypeme jeho obsah do modrého zásobníka na Sinugator®-e. Umiestnite bielu motorovú jednotku nad modrú nádržku a otáčajte dovtedy, pokiaľ nie je zaistený. Dôkladne zatrasíme pre rozpustenie zmesi.

Krok 3: Postavte sa do prednej časti umývadla, jemne sa predkloňte a nakloňte hlavu. Držte si ústa otvorené, bez toho, aby ste zadržali dych. Umiestnite špičku Sinugatora® tak, aby priliehala k vašej pravej nosovej dierke.

Stlačte modré tlačidlo napájania, kým roztok začne vytekať z ľavej nosnej dierky. V závislosti na polohe hlavy zvyšný roztok môže vytečť aj z úst. Odporúčame ho vyplúť, ale nie je nič zlého ani pri náhodnom požití. K riadnemu vypláchnutiu držte stlačené tlačidlo napájania, pokiaľ aspoň 1/4 až 1/2 (60 ml až 120 ml) roztoku sa použije na vypláchnutie jednej nosnej dierky. Prístroj zastavíte stlačením tlačidla napájania v prípade, ak cítite nevoľnosť, bolesti alebo tlak v priebehu vyplachovania.

Krok 4: Vysmrkajte zvyšnú zmes veľmi jemne, bez úplného uzavretia nosa, aby sa zabránilo tlaku na ušné bubienky. Ak to znesiete, môžete vtáhať jemne zvyšný roztok, ktorý zostal v nosovom priechode raz alebo dvakrát, pretože to môže vyčistiť zadnú plochu nosohltanu, čo je plocha na zadnej strane nosového priechodu.

Krok 5: Teraz zopakujte kroky 3 a 4 pre vypláchnutie ľavej nosnej dierky.

Pokyny na čistenie


Vyčistite Sinugator® spustením čistej vody a vysušte uterákom, ktorý nepúšťa vlákna, a potom vysušte prístroj ponechaním ho otvoreného na vzduchu. Špička nosného vyplachovača, modrá a biela mäkká trubička môžu byť dezinfikované umiestnením v mikrovlnnej rúre po dobu 60 sekúnd. Vyčistite celú jednotku s niekoľkými kvapkami prípravku na riad a vody každé tri dni a po celú dobu treba prístroj udržiavať v čistote. Prosíme, uistite sa, že na umývanie používate dostatok vody pri každom umývaní tak, aby po umývaní neostal na prístroji žiaden umývací prostriedok.

Varovanie

Nekladte bielu motorovú jednotku do mikrovlnnej rúry po dobu dezinfekcie. Vzhľadom ku komponentom produktu z nehrdzavejúcej ocele, môže dôjsť k poškodeniu alebo vzniku požiaru.

Výhody, ktoré SINUS RINSE™ ponúka:

- ✓ upokojujúce pre Váš nos, žiadne pálenie alebo pichanie, systém vyplachovania nosa pomocou veľkého objemu fyziologického roztoku pod malým tlakom
- ✓ hydratácia a každodenná hygiena nosa
- ✓ bez konzervačných látok, liečiv, jódu
- ✓ bez BPA, lepku alebo latexu
- ✓ upravené zmesi chloridu sodného a hydrogénuhličitanu sodného (stupeň čistoty 99% alebo vyššia)
- ✓ vynikajúci na očistu pred striekaním nosových kortikosteroidov
- ✓ pH vyvážený izotonický alebo hypertonický obsah s dvoma alebo viacerými sáčkami
- ✓ pulzačný tok
- ✓ vhodné pre použitie po operácii nosa alebo dutín a počas tehotenstva
- ✓ 5 rokov záruka od výrobcu

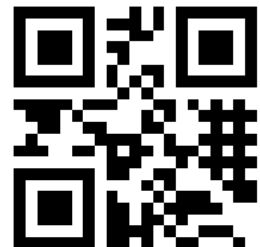

Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica
www.cistynos.sk info@cistynos.sk, mobil: 0907 368 190