

Príbalová informácia pre užívateľa

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnik. SuavEar® je zdravotnícka pomôcka.

NeilMed® SuavEar® roztok na odstraňovanie ušného mazu

Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balenia:

- 1 fľaša 6,5% karbamidových ušných kvapiek 15 ml
- 2 zátky do uší
- 1 ušná striekačka s priehľadným mäkkým hrotom
- 1 drenážny pohár

Neilmed® SuavEar sa používa na:

- Neilmed® SuavEar je pomôcka na odstraňovanie ušného mazu
- NeilMed SuavEar na príležitostnú pomoc na zmäkčenie, uvoľnenie a odstránenie nadmerného ušného mazu
- Kompletný 2-krokový systém, ktorý bezpečne odstraňuje prebytočný ušný maz

Zloženie

Aktívna zložka: Peroxid karbamidu 6,5% - pomôcka na odstránenie ušného mazu

Neaktívne zložky: Glycerín, Oxychinolín

Pokyny

NA POUŽITIE LEN V UCHU!

Dospelí a deti vo veku 12 rokov:

Nakloňte hlavu nabok. Kvapnite 5 až 10 kvapiek do ucha, pričom dbajte na to, aby sa špička aplikátora nedostala do zvukovodu. Uchovávajte kvapky v uchu niekoľko minút, buď pomocou priložených štipľov do uší, alebo držaním hlavy naklonenej nabok. Všetok maz zostávajúci po ošetrení možno odstrániť jemným prepláchnutím ucha teplou vodou pomocou priloženej mäkkej silikónovej striekačky. Používajte dvakrát denne po dobu až štyroch dní alebo podľa pokynov lekára.

Deti do 12 rokov: poradte sa s lekárom

Ďalšie informácie


Fľaštičku skladujte vo vonkajšom obale. Produkt pri kontakte s ušným mazom pení v dôsledku uvoľňovania kyslíka. Môže sa vyskytnúť pridružený zvuk „praskania“. Uzáver ponechajte na fľaši, keď sa nepoužíva.

Upozornenie

POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU, AK SYMPTÓMY PRETRVÁVAJÚ, VYHĽADAJTE SVOJHO LEKÁRA. VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD.

VAROVANIE

- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak máte drenáž alebo výtok z ucha
- Nepoužívajte ak máte bolesť ucha, podráždenie alebo vyrážku v uchu, závrat, poranenie alebo perforáciu (prederavenie) bubienka, nedávno ste podstúpili operáciu ucha
- Pri používaní tohto produktu sa vyhýbajte kontaktu s očami
- Prestaňte prípravok užívať a opýtajte sa lekára, ak ho potrebujete užívať dlhšie ako 3 dni za sebou
- Tento a všetky lieky uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc

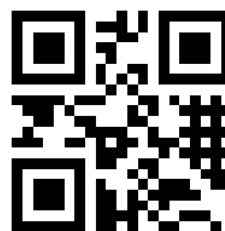

Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oreburská 1, 974 04 Banská Bystrica
www.cistynos.sk info@cistynos.sk, mobil: 0907 368 190

Revízia: 04/2022